


ユニキャップ[®]

(吸引ホース用キャップ)

ユニキャップは、吸引ホースからの液垂れを防ぐためのキャップです。

特徴：内径が $\phi 4\sim 9$ mmの吸引ホースに
使えます。(外形 $\phi 15$ mm以下)
キャップ周囲のカバーがホース差込み
突起の手指接触を防ぎます。

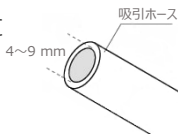


ご使用方法：吸引を終え吸引器のスイッチをOFFにした後ホースに取り付けてください。吸引する場合は、キャップを外した状態で吸引器のスイッチをONにしてください。

ご注意：キャップは吸引ホースに強く差し込まないでください。
[差し込みすぎると外れにくくなります]

洗浄、消毒方法：中性洗剤を用いて汚れを落としてください。
消毒には、消毒用アルコール又は次亜塩素酸ナトリウム
消毒液をご使用ください。

サイズ/素材： $\Phi 2 \times 6$ cm / PP

お問い合わせ： Email "info@izaikaihatsu.com"



Made in Japan